

Respirair Large

Mascarilla de silicona

Nuestras mascarillas están fabricadas en silicona y se adaptan perfectamente al contorno de la boca y nariz para proporcionar un mejor sellado, siendo extra suaves con la piel del rostro y evitando irritaciones.

Con una boquilla de 22 mm. redonda permiten un perfecto acoplamiento, impidiendo fugas de medicamento y la perfecta distribución del mismo.

Compatible con la mayoría de cámaras del mercado.

Respirair Large

a partir de 6 años







MASCARILLA DE SILICONA

Boquilla universal de 22 mm. para cámaras de inhalación

www.respirair.es

INSTRUCCIONES DE USO

- Siga siempre las instrucciones del medicamento aerosol (MDI) y de la cámara de inhalación.
- Inserte el bote del medicamento (MDI) en el adaptador universal de la cámara.
- Conecte la mascarilla **Respirair**® a la boquilla de la cámara presionando ligeramente.
- Coloque ahora la mascarilla **Respirair**® sobre la cara del paciente, de manera que queden cubierta nariz y boca completamente.
- Presione ligeramente para que el contorno de la mascarilla se adhiera perfectamente sobre la cara del paciente. Exhale totalmente el aire.
- Accione el medicamento (MDI) y mantenga la cámara en la misma posición hasta que el paciente haya realizado 5 o 6 respiraciones.
- Retire la cámara y repita si fuera necesario una nueva dosis, siempre de acuerdo con las instrucciones del uso del inhalador o aerosol (MDI).

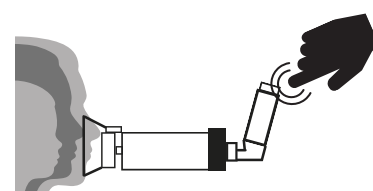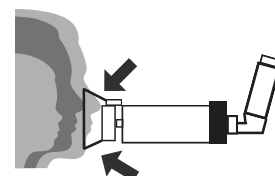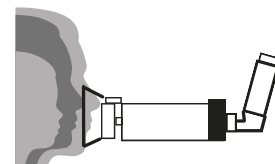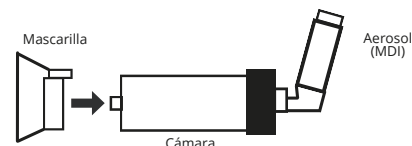

INSTRUCCIONES CONSERVACION Y LIMPIEZA

- Antes de utilizar por primera vez la cámara o la mascarilla **Respirair**®, lávela siguiendo las instrucciones y se recomienda hacerlo una vez a la semana.
- Sumérjala durante 15 minutos en agua templada con un detergente líquido suave y frote suavemente.
- Aclare con agua limpia y sacuda el resto de humedad y espere a que se seque completamente.
- No utilice un paño para limpiarla o secarla, podría producir electricidad electrostática o dejar restos de pelusa.
- Vuelva a colocar la cámara **Respirair**® en la cámara inhaladora cuando esté totalmente seco y listo para utilizar.

RECUERDE

- No es un juguete, mantener alejado de los niños.

www.respirair.es



Versión 1.1 01/06/2022

Distribuido por:
Servicios de Marketing y
Comunicación Enrédade S.L
info@respirair.es

EC REP
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasde 8, 80807
Munich, Germany
SRN: CN-MF-000007138

Fabricado por:
Hubei Yi-Ya Protective Products Co.,
Ltd
Miandong Road. Hefeng Village, Xiliuhe
Town, Xiantao City, Hubei Province,
China